



Glukosemessung aus der NaF-Monovette

Einstellung der Messung im Serum

LI28C067 / 04-2023

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrtes Praxisteam,

wie bereits in unserer „Kurz & Lab“ Herbst-Winter 2021 angekündigt, werden wir die Messung der Glukose aus dem Serum einstellen.

Ab dem

01.05.2023

erfolgt die Messung dann ausschließlich aus der gelben

NaF-Monovette (Art.-Nr.: 04.1903.001)

(S-Monovette® Fluorid/EDTA, 2,6 ml).

Hintergrund: Da unmittelbar nach der Blutabnahme ein kontinuierlicher Abbau der im Blut enthaltenen Glukose einsetzt, führt dies zu falsch niedrigen Messergebnissen. Dies wird durch die einsetzende Gerinnung noch verstärkt. Um diesen Effekt zu unterbinden, wird die Bestimmung der Glukose künftig ausschließlich aus der speziellen NaF-Monovette angeboten. Diese können Sie selbstverständlich bei uns kostenfrei bestellen.

Vielen Dank.

Ihr Laborteam Greifswald

Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter kontakt@imd-greifswald.de

oder unter der Rufnummer 03834 / 8193-0